

Insturen oorbiopten naar GD

Materiaal voor het nemen en verzenden van oorbiopten is te bestellen via www.gdwebshop.nl. Het 'BVD Oorbioptnamepakket' (artikelnummer VDRGEB082) bevat geadresseerde retourenveloppen, sealbags en de handleiding digitaal inschrijven.

Goed om te weten

Doe oorbiopten altijd in een afgesloten sealbag in de retourenvelop. Zo voorkom je verlies van oorbiopten als de envelop beschadigt tijdens de verzending. Noteer op de achterzijde van de envelop je postcode, huisnummer en eventueel UBN-nummer.

Ben je dierenarts en stuur je voor veehouders wel eens oorbiopten naar GD? Vraag hen dan om ze in de sealbag te doen of verpak ze in bijvoorbeeld een serumbuis.

Je kunt meer oorbiopten tegelijk inschrijven en insturen. Zo bespaar je inzendkosten. Voor een betrouwbaar resultaat is het wél belangrijk om de oorbiopten maximaal twee weken én gekoeld te bewaren.

Let op: als een levend rund al twee oormerken heeft, is het voor een veehouder wettelijk niet toegestaan om een blanco oorbiopt te nemen. De dierenarts mag dat wel. Een bloedmonster laten onderzoeken op BVD-virus kan ook.

Hulp op afstand met Teamviewer

Met Teamviewer helpt onze klantenservice je op afstand. Handig voor vragen op het moment dat je met VeeOnline bezig bent. Met Teamviewer kunnen wij meekijken en aanwijzingen geven; wij kunnen niet in jouw bestanden en nemen ook niet de computer over. Bel 088 20 25 500 en wacht op instructies van onze medewerkers om Teamviewer te downloaden.



Meer informatie vindt u op:
www.gddiergezondheid.nl/veeonline-rund

